



Einsender:	Patientendaten:
-------------------	------------------------

Untersuchungsanforderung Zirkulierende Tumor DNA (ctDNA)

(Bitte ankreuzen)	
Erkrankung	Gen/Mutation
<input type="checkbox"/> Lungenkarzinom, nichtkleinzellig (NSCLC)	EGFR T790M

Klinische Anmerkungen:

Entnahmedatum / Uhrzeit:	Unterschrift:
---------------------------------	----------------------

Bei Anwendung bitte unbedingt beachten!

- **Blutentnahme:**
 - Bitte verwenden Sie zur Blutentnahme ausschließlich die von uns zur Verfügung gestellten **PAXgene Blood ccfDNA Röhrchen (CE-IVD)**
 - Röhrchen mit Patientennamen und Geburtsdatum beschriften
 - Blutentnahme nach CLSI H3-A66 mit **BD Vacutainer® UltraTouch™ Push Button Blood Collection Set**
 - **Patientenarm** muss in einer **abwärts gerichteten Position** gehalten werden, damit kein Rückfluss entstehen kann (PAXgene Blood ccfDNA Röhrchen enthalten chemische Zusatzstoffe!)
 - Röhrchen möglichst aufrecht halten
 - **Bitte befüllen Sie das/die Röhrchen vollständig (10 ml)**
 - Röhrchen vom Adapter entfernen und **unverzüglich 10-mal invertieren**
- **Versand:**
 - Röhrchen nicht einfrieren, das/die Röhrchen können **bei Raumtemperatur gelagert und verschickt** werden (Dauer der Stabilisierung: 7 Tage bei 2-30°C, 1 Tag bei >30°C)
 - **Vollblut sollte spätestens am Tag 4 zu Plasma verarbeitet werden (bitte bei der Versendung der Proben einberechnen)**
 - Röhrchen gut gesichert verschicken, z.B. in einem Schutzgefäß
 - Versand erfolgt in einem mit **UN3373 gekennzeichneten Paket**